



Instrucciones
de uso



Lea atentamente estas
instrucciones



ATENCIÓN: lea las
advertencias



Mini-Click es un producto sanitario

Mantenga estas instrucciones

1. Uso previsto e indicación de uso

Este dispositivo es un electroestimulador alivio de mordeduras que, mediante la liberación de microimpulsos eléctricos, es capaz de aliviar los síntomas locales (picazón y inflamación) causados por picaduras de mosquitos y en particular está destinado a: • aliviar el picor causado por las picaduras de mosquitos • aliviar la hinchazón (inflamación) causada por las picaduras de mosquitos • aliviar las consecuencias de las picaduras de mosquitos eliminando la necesidad de rascarse.

2. Cómo funciona

El funcionamiento se basa en la piezoelectricidad: cuando se pulsa el botón de activación, se genera un pequeño impulso eléctrico. Si se aplica al área de la picadura, el impulso eléctrico es capaz de reducir picor y hinchazón, y de prevenir la necesidad de rascarse, que puede portar infección. No requiere pilas.

3. Modo de empleo:

- sostenga el dispositivo entre sus dedos índice y medio;
- coloque la punta del dispositivo en contacto con la piel sobre el área de la picadura;
- pulsa el botón de activación con el pulgar para generar el pulso;
- repetir como se indica en el par. 3.1.

Cada uno impulso se percibirá la sensación de un pequeño pellizco, que varía en función de la sensibilidad individual y puede ser percibido más por los niños. **El efecto beneficioso se notará después de unos minutos.**

Para obtener los mejores resultados, utilice el aparato lo antes posible después de la picadura o tan pronto como advierta el picor o pueda ver la hinchazón.

Conecta el dispositivo un juego de llaves a través del anillo especial, para tenerlo siempre a mano.



3.1 Cantidad de impulsos

Adultos y adolescentes:

- aplica 5/10 pulsos, desplazando el dispositivo alrededor de la picadura, para tratar toda la parte afectada.
- 10 minutos después de la primera aplicación, si aún tiene picor, puede aplicar otros 5/10 impulsos.

Para las personas más sensibles o alérgicas, o para reducir la hinchazón, otras aplicaciones pueden ser necesaria: puedes aplicar, por lo tanto, otros impulsos, segundo cuanto está indicado al par. 3.2. En cualquier caso, no aplicar más de 10 impulsos a la vez.

Niños:

- aplica 5 impulsos para reducir la picazón, desplazando el dispositivo alrededor de la picadura, de manera que se trate toda la parte afectada.
- 10 minutos después de la primera aplicación, si el niño advierte aún picor, puedes aplicar otros 5 impulsos. Aplicaciones adicionales no han sido clínicamente probada.

3.2 Frecuencia de administración

Después de la primera aplicación, espere al menos 10 minutos para volver a utilizar el dispositivo en el mismo lugar.

4. INFORMACIONES PARA LA SEGURIDAD



4.1 CONTRAINDICACIONES

NO UTILICE:

- en sujetos que tengan un marcapasos cardíaco, un desfibrilador implantado u otros dispositivos metálicos o electrónicos implantados;

- en personas con problemas cardíacos o epilépticos
- en mujeres embarazadas
- en niños menores de 6 meses.

4.2 ADVERTENCIAS

NO UTILICE:

- sobre las heridas abiertas o en la piel no intacta o con condiciones de infección, y en zonas sangrantes y mucosas
- en las proximidades de sustancias inflamables líquidas o gaseosas, o después de la aplicación de insecto-repelen-tes o de sustancias inflamables (como perfumes o desodorantes), porque el aparato podría encender una llama
- con manos húmedas o su piel húmeda.

4.3 PRECAUCIONES:

- no utilizar/utilizar con precaución:
- sobre o alrededor de zonas sensibles como la boca, la lengua, los ojos, las orejas, el interior de las muñecas, las pal- mas, los dedos, etc.
- personas especialmente sensibles a la estimulación eléctrica;
- SE RECOMIENDA EL USO EstrictAMENTE PERSONAL DEL PRODUCTO: el aparatado está destinado a un uso individual. Con el fin de no favorecer una posible.
- Solo para el utilizo externo.
- Si el dispositivo no se utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede hacer que la parte tratada especialmente sensible o irritada. Interrumpir el uso en caso de irritación.
- Es un dispositivo médico. No es un juguete.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de las personas con movilidad reducida o capacidad sensorial. Pequeñas partes pueden ser ingeridas o inhaladas.

4.4 ATENCIÓN

- Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el uso del aparato deberá notificarse al fabricante (info@tecnimed.e) y a la autoridad competente de su país.

5. Limpieza y mantenimiento

Limpiar la superficie del dispositivo con un paño humedecido y si es posible, volver a aplicar un desinfectante. Dejar secar adecuadamente. Si entra agua en el dispositivo, asegúrese de que se seque completamente antes de usarlo.

6. Características técnicas

- Tensión de descarga: 13 kV aprox. (sin carga)
- Duración del pulso: 0,01 ms
- Fuente de alimentación: piezoeléctrica
- Vida útil prevista: 20/25.000 impulsos circa
- Grado de protección IP: IP22

- Parte aplicada tipo BF 

7. Eliminación



Al final de la propia vida útil, eliminar como residuo de equipo electrónico (RAEE)

Patentes no. EP2089102(B1), US8712555, US9474899(B2), AU2007320897B2.

Probado clínicamente



Número de lote, visible en el lado del dispositivo (las dos primeras cifras indican el año de producción, la tercera y la cuarta cifras la semana de producción)

SIN FECHA DE CADUCIDAD



Código UDI, marcado en el Dispositivo.



Modelo: Mini-Click 06300



Dispositivo médico de clase IIa



Fabricado en Italia por **Tecnimed srl**
12, P.le Cocchi – 21040 Veduggio O. (VA)
www.tecnimed.com – info@tecnimed.eu