



Lire attentivement les  
instructions



ATTENTION: lire les  
précautions d'emploi



Zanza-Click est un dispositif médical

Merci de conserver ces instructions.

## 1. Usage prévu et indication d'utilisation

Zanza-Click est un électrostimulateur après piqûre qui, par la libération de micro-impulsions électriques, peut soulager les symptômes locaux - démangeaisons et inflammation - causés par les piqûres de moustiques et, en particulier, il est destiné à :

- réduire les démangeaisons dues aux piqûres de moustiques,
- réduire le gonflement (inflammation) dû aux piqûres de moustiques,
- réduire les conséquences des piqûres de moustiques en stoppant l'envie de se gratter.

## 2. Comment il fonctionne:

Le fonctionnement est basé sur la piézo-électricité: lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation, une petite impulsion électrique est générée. Lorsqu'il est appliqué sur la zone de la piqûre, l'impulsion électrique est capable de réduire démangeaison et gonflement et de prévenir la nécessité de se gratter qui peut conduire à des infections. L'appareil ne nécessite pas de piles.

## 3. Mode d'emploi:

- tenez le Zanza-Click entre votre index et votre majeur;
- placez l'extrémité du dispositif directement en contact avec la zone piqué;
- appuyez sur le bouton d'activation avec votre pouce (voir la figure) pour déclencher l'impulsion;
- répéter comme indiqué dans le par. 3.1.

**A chaque click sera perçue une sensation de léger picotement.** Cette sensation peut varier en fonction de la sensibilité individuelle et peut être plus importante chez les enfants.

**L'effet est perceptible quelques minutes après utilisation. Pour de meilleurs résultats, utilisez Zanza-Click dès que possible après avoir été mordu** ou dès que vous ressentez l'envie de vous gratter et que vous pouvez voir le gonflement. Attachez le Zanza-Click à votre porte-clés, et gardez-le toujours avec vous.

### 3.1 Quantité d'impulsions ("clicks")

Adultes et adolescents:

- appliquez de 5 à 10 impulsions ("clicks") en déplaçant le dispositif autour de la piqure de manière à traiter toute la zone.
- 10 minutes après la première application, si votre enfant perçoit encore des démangeaisons ou si vous constatez qu'il a besoin de se gratter, vous pouvez appliquer 5 clics supplémentaires
- Dans le cas de personnes particulièrement sensibles aux piqûres de moustiques, ou pour réduire le gonflement, des applications supplémentaires peuvent être nécessaires: si c'est le cas, des clics supplémentaires peuvent être appliqués à nouveau, selon le par. 3.2. Toutefois, ne pas appliquer plus de 10 clics à la fois.

Enfants:

- appliquer d'abord 5 clics, en déplaçant le dispositif autour de la piqure de manière à traiter toute la zone.
- 10 minutes après la première application, si votre enfant perçoit encore des démangeaisons ou si vous constatez qu'il a besoin de se gratter, vous pouvez appliquer 5 clics supplémentaires. Les applications supplémentaires n'ont pas été testées cliniquement.

### 3.2 Fréquence d'administration

Après la première application, attendre au moins 10 minutes avant de réutiliser le dispositif sur le même site.



## 4. INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ

### 4.1 CONTRE-INDICATIONS

NE PAS UTILISER:

- sur les patients portant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre dispositif métallique ou électronique implanté;



- sur les patients ayant une maladie cardiaque ou une épilepsie;
- sur les femmes enceintes;
- sur les enfants de moins de 6 mois.

#### 4.2 AVERTISSEMENTS

##### NE PAS UTILISER:

- sur des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, ou sur des états cutanés infectés ou pathologiques ou anormaux, sur des zones de saignement ou de sécrétion et sur les muqueuses;
- près de liquides ou de gaz inflammables ou si vous avez utilisé des répulsifs d'insectes et/ou des substances inflammables (par exemple: parfum, déodorant, etc.), car cet appareil peut enflammer les substances inflammables.
- avec les mains mouillées ou sur la peau mouillée.

#### 4.3 PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser/utiliser avec caution:
  - sur ou à proximité de zone sensibles comme yeux, bouche, oreilles, muqueuses, partie interne des poignets, la paume de la main, etc
  - si vous êtes sensibles aux stimuli électriques
- L'UTILISATION PERSONNELLE DU PRODUIT EST RECOMMANDÉE: utiliser le dispositif sur un seul patient. Afin d'éviter la transmission d'infections, ne pas utiliser sur plus d'un patient.
- Uniquement pour usage externe
- Lorsque ce dispositif n'est pas utilisé conformément à ce mode d'emploi, il peut provoquer une sensibilité ou une irritation au niveau du site d'application. Interrompre l'utilisation en cas d'irritation
- Zanza-Click est un dispositif médical. Ne l'utilisez pas comme un jouet.
- Tenir hors de portée des enfants et de personnes avec facultés motrices et sensorielles réduites. Les petites pièces peuvent être ingérées ou inhalées.

#### 4.4 ATTENTION

- Tout incident grave survenant en relation avec l'appareil doit être signalé au fabricant (info@tecnimed.eu) et à l'autorité compétente de votre pays.

### 5. Nettoyage et entretien

- Nettoyez la surface avec un chiffon doux et humide, en l'enveloppant éventuellement d'un chiffon imbibé de désinfectant, et séchez-la soigneusement.
- Si de l'eau pénètre dans l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

### 6. Données techniques

- Tension de décharge: environ 14kV (sans chargement)
- Durée de l'impulsion: 0,01 ms
- Alimentation: piézoélectrique
- Durée de vie prévue de l'appareil: 20/25.000 décharges environ.
- Degré de protection IP: IP22
- Partie appliquée type BF



### 7. Mise au rebut



A la fin de sa vie, veuillez mettre cet appareil au rebut de manière responsable, conformément à la législation en vigueur.

Brevets n. EP2089102(B1), US8712555, US9474899(B2), AU2007320897B2

Testé cliniquement



Numéro de lot: marqué sur l'appareil (les 2 premiers chiffres indiquent l'année de production, les troisième et quatrième chiffres la semaine de production).

Le dispositif n'a pas de date d'expiration.



Code UDI: marqué sur l'appareil



Modèle: Zanza-Click 06000



Dispositif médical classe IIa



Fabriqué en Italie par Tecnimed srl  
12, P.le Cocchi – 21040 Veduggio O. (VA)  
www.tecnimed.com – info@tecnimed.eu